
磁気ループシステム 取付マニュアル


茅ヶ崎市
福祉部 高齢福祉課

磁気ループシステム 取付マニュアル

磁気ループシステム

磁気ループシステムとは、マイクが拾った話し手の声を磁気信号に変換して、そこから送られる磁気を補聴器で受信することによって、雑音の少ない鮮明な音声を聞くことができる装置です。平成27年度に、市民要望を受け、携帯型の会議室用と窓口用の磁気ループを各1台ずつ配置しました。

～磁気ループ 基本の取付方法 (全体図)～

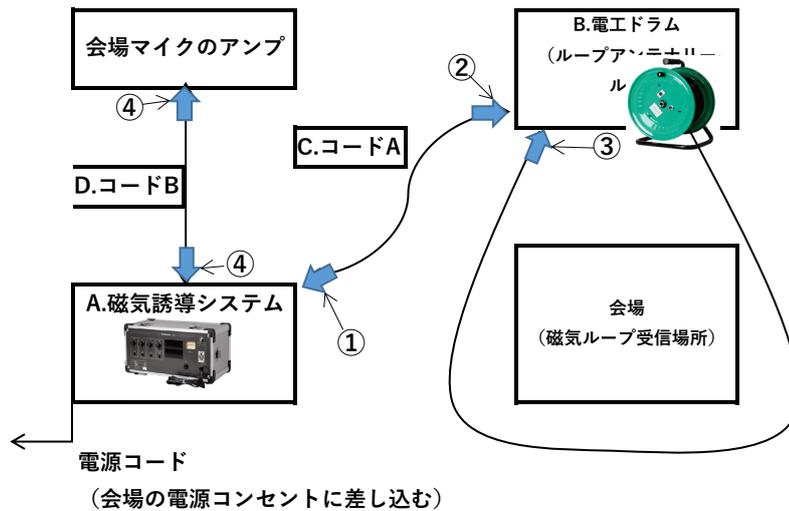

～貸出物品～ ※取付前にご確認ください。

<p>A. 磁気誘導システム (本体)</p> 	<p>B. 電工ドラム (ループアンテナコード20m) ※コード番号③</p> 	<p>C. コードA (①・②のシール)</p> 
<p>D. コードB (④のシール)</p> 	<p>E. 専用受信機 (5台)</p> 	<p>F. マイク (有線、ピンマイク)</p> 

～ 基本の取付方法 ～

①

1：電工ドラム（ループアンテナコード）を引出し、磁気ループの使用場所を囲むように這



電工ドラム（ループアンテナコード）を引き出し、地面に這わせた後、電工ドラム（ループアンテナコード）のジャック③と電工ドラム（ループアンテナ）側面の③に挿入します。

【お役立ちメモ】

会場が広い場合で、受信機の聞こえが悪い場合は・・・。
ループアンテナコードを2重で這わせることで、より鮮明に専用受信機が磁気を受信することができます。可能な場合は、2重に這わせてください。



2：磁気誘導システムと電工ドラム（ループアンテナコード）を繋げます。

磁気誘導システム（本体）のフタを外し、アンテナを立てます。
コードAの①のジャックを磁気誘導システムの①に挿入します。



・ループアンテナリールのジャック②に
コード②を挿します。磁気誘導システムと
ループアンテナリールが繋がりました。



工程2. 終了時



3：磁気誘導システムと会場マイクのアンプを繋げます。


- ・磁気誘導システムにコード④を挿します。



- ・会場マイクの音響設備の「外部出力」にコード④を挿します。

※アンプの種類によってはコード④の挿し込み口を交換する必要があります。

※茅ヶ崎市役所分庁舎6階コミュニティホールの音響設備

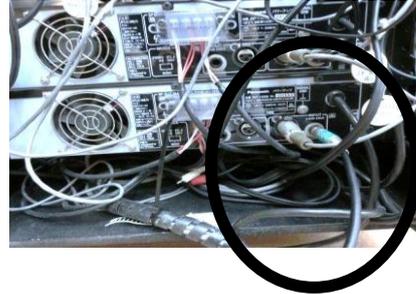

コード④の挿し込み口の部品は、磁気誘導システム（本機）のふたのポケットに入ってます。



工程3. 終了時（①から④のコードが全て繋がっていることを確認してください。



②

1：電源を入れます。

- ・磁気誘導システムのコンセントを差し、電源を入れます。



- ・専用受信機の電源を入れます。
※附属の電池を入れてください。



2：音量を調整します。

- ・音量は専用受信機及び磁気誘導システムより調整できますが、まず、専用受信機から、音量調整をしていただき、それでも音が聞こえづらい場合は、磁気誘導システムの音量を調整してください。

※磁気誘導システムの音量を変更すると、全ての専用受信機の音量が変わります。



磁気ループシステム 取付完了

～ 使用上の注意 ～

- ・コード等は転倒防止のため、養生テープで止めてください。ガムテープは禁止です。
- ・使用前と使用後の部品の有無を必ずご確認ください。紛失・破損等は弁償していただきます。
- ・磁気誘導システムのその他のボタン、ダイヤル等は操作しないでください。
- ・専用受信機、マイクは使用后必ず電池を出してください。
- ・磁気ループのお渡しと返却の際は、職員が立ち会いのもと、物品の確認をいたします。